

# GUIDE TECHNIQUE

## Tiralo



*Le fauteuil de baignade pour personne à mobilité réduite*

### SOMMAIRE

Définition du produit	02
Caractéristiques techniques	02
Conditions d'utilisation	03
Consignes de sécurité	03
Montage	04
Garantie	05
Références	05

# DEFINITION DU PRODUIT

Le fauteuil Tiralo est un fauteuil dédié au déplacement et à la baignade des personnes à mobilité réduite pour qu'elles puissent profiter des joies de la plage.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


### DIMENSIONS / INFORMATIONS TECHNIQUES :

Largeur	Largeur de l'assise	Hauteur dossier	Hauteur de l'assise	Longueur
107 cm	50 cm	90 cm	45 cm	Timon plié : 220 cm

Composition*	Poids fauteuil	Couleur(s)	Capacité de poids	Poids colis	Dimensions colis
Aluminium Inox	31 kg	bleu jaune	min : 25 kg max : 130 kg	38 kg	178 x 104 x 58 cm

**\*Note :** Châssis en aluminium et inox - siège filet tissé en nylon anallergique

### DESCRIPTIF DES ELEMENTS

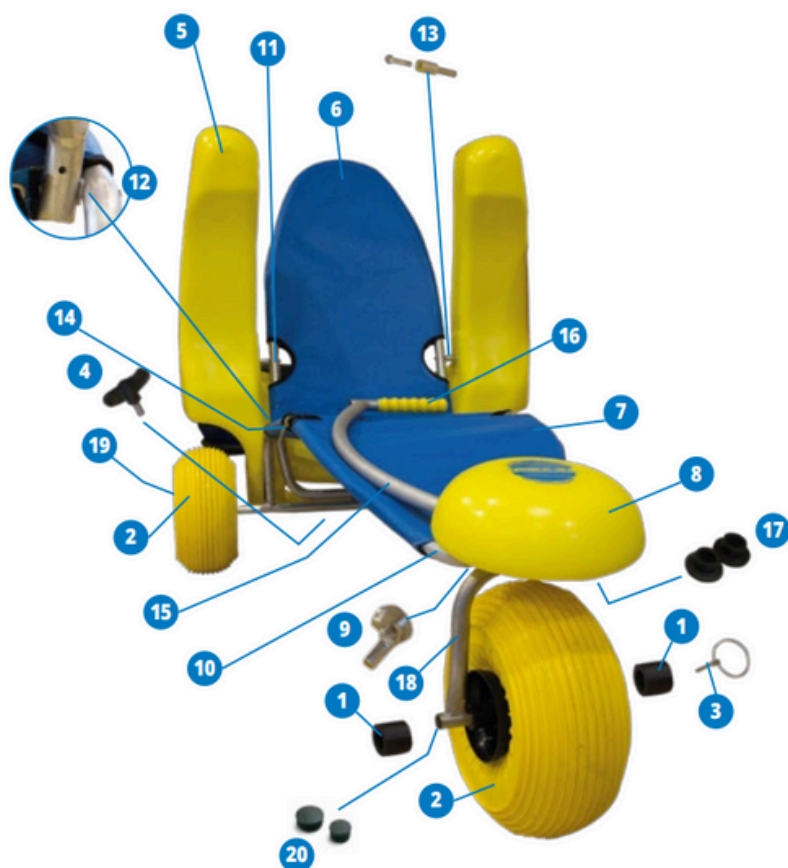

- 1 Bague noire de calage pour roue avant
- 2 Roue
- 3 Clip roue ou fourche avant
- 4 Vis papillon tête noire pour fixation dossier
- 5 Flotteur
- 6 Toile dossier
- 7 Toile assise
- 8 Bol jaune
- 9 Vis papillon inox pour fixation bol
- 10 Châssis principal avec raidisseur et axes de roues
- 11 Dossier en aluminium
- 12 Articulation dossier comprenant axe fileté + 2 vis + rondelle
- 13 Vis fixation flotteur + entretoise inox
- 14 Velcro fixation timon + 2 vis
- 15 Timon+poignée+bouchon diam. 25 + chape d'articulation
- 16 Poignée timon
- 17 Bague d'articulation pour fourche
- 18 Fourche
- 19 Axe roue arrière inox + 2 rivets
- 20 Jeu de bouchons de plastique noir cache tube



- Très bonne flottabilité grâce à son flotteur accoudoirs monobloc
- Fauteuil tracté par une barre de traction équipée d'une poignée
- Montage simple (composé de peu de pièces)
- Structure ergonomique
- Nécessite peu d'entretien
- Confortable d'utilisation

## CONDITIONS D'UTILISATION

### NOS RECOMMANDATIONS :

Pensez à rincer après chaque utilisation avec de l'eau claire votre Tiralo, notamment au niveau des accoudoirs afin de limiter l'endommagement des vis par l'eau de mer.

Le Tiralo n'est pas conçu pour le mauvais temps ou pour flotter dans une eau agitée. Son utilisation nécessite la présence d'un accompagnateur. Pour leur sécurité, il est conseillé aux utilisateurs de porter un gilet de sauvetage dans l'eau.

Pour effectuer un transfert, l'accoudoir peut-être relevé. Une fois dans l'eau, il se verrouillera automatiquement par la pression de l'eau lors de la baignade. Pour sortir du fauteuil une fois dans l'eau, effectuer un transfert de poids vers l'avant. L'utilisateur glissera dans l'eau.

Durant la baignade, rabattez et fixez la barre de remorquage sur le côté du châssis à l'aide du velcro noir.

Les roues sont gonflées à basse pression (0,20 psi). Il ne faut pas les surgonfler car, au soleil, elles peuvent prendre du volume (risque de déformation).

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- S'assurer que le TIRALO est opérationnel.
- Munir l'utilisateur d'un gilet de sécurité avec tête.
- Choisir la baignade par mer calme et en zone surveillée.
- L'accompagnant doit veiller à avoir lui-même pied, ne pas amener l'utilisateur dans les vagues ou dans le courant.
- Ne pas laisser une personne seule sur le Tiralo.
- Attention aux risques d'insolation liés à une immobilité sur la plage.
- Ne pas attacher l'utilisateur sur le fauteuil.

# MONTAGE DU FAUTEUIL

Le Tiralo vous a été livré plié mais pratiquement monté. Dans un sac plastique, vous trouverez une pochette contenant : 3 clips roue (3), 2 bagues noires (1), 1 vis papillon tête noire (4), ce qui vous permettra de finaliser le montage.

## ***Etape 1 : Montage roue avant***

Fixez la barre de dossier rembourrée, le support rembourré et la barre de liaison à roulettes au châssis avec les goupilles de fixation comme indiqué sur le croquis. Fixez les roues au cadre principal comme illustré. Assurez vous que les tubes sont correctement verrouillés.




## ***Etape 2 : Montage roue arrière***

Enfiler une roue de chaque côté de l'axe et verrouiller avec le clip (3).



## ***Etape 3 : Montage du dossier***

Le relever et le fixer à l'aide de la vis papillon tête noire (4) à l'essieu, sous le flotteur.

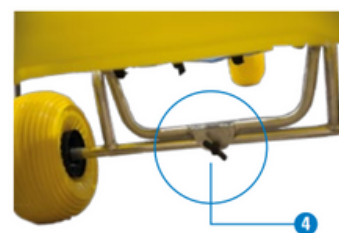

## ***Dernières vérifications***

- Le dossier est relevé et bien verrouillé par la vis papillon.
- Le bol flotteur est correctement monté, les vis papillon bien serrées.
- La roue avant est correctement calée entre les deux bagues noires et le clip verrouillé.
- Les roues arrière sont retenues par leurs clips inox.



## ***Remplacement de la toile d'assise***

Démonter le bol (8), fixé à l'aide des vis papillon (9). Enlever le clip (3). Retirer la bague d'articulation du dessus (17). Défaire la fourche avant (18).



Faire glisser la toile vers l'avant. Renfiler la nouvelle toile de la même manière et remonter la fourche et le bol.



### Remplacement de la toile de dossier

Dévisser le flotteur (5) en retirant la vis d'articulation (12) de chaque côté. Veillez à ne pas perdre les entretoises placées dans les orifices du flotteur. Retirer le flotteur. Faire glisser la toile vers le haut. Renfiler la nouvelle toile de la même manière et remonter le flotteur.



### Utilisation des roues

Les roues qui équipent votre Tiralo sont des roues basse pression qui lui permettent de rouler facilement sur tout terrain (attention, cependant, aux éléments tranchants).

POIDS : 3 kg

PRESSION : 300 g, soit 0.20 PSI

GONFLAGE : Pour gonfler ou dégonfler vos roues, utiliser une pompe à vélo.

REPARATION : de petites entailles peuvent être réparées avec de la colle de cyanoacrylate.

## GARANTIE

**A.R. International offre sur le fauteuil Tiralo une garantie de deux (2) à compter de la date de livraison. La garantie ne couvre pas une mauvaise utilisation du Tiralo. La garantie se limite à un vice de fabrication constaté lors de l'utilisation normale du Tiralo et conduira au changement des pièces défectueuses gratuitement. Notre garantie ne peut intervenir si vous avez, sans notre accord préalable, modifié ou remplacé une pièce d'origine par un autre produit.**

## REFERENCES



Scannez moi pour découvrir l'intégralité de notre gamme de fauteuils et équipements