

# GUIDE TECHNIQUE

# Mobi-walk



*Mobi-walk est un déambulateur idéal pour l'accès à tous sur le sable*

## SOMMAIRE

Caractéristiques générales	02
Fabrication et description	02
Garantie	02

# CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

## DIMENSIONS / INFORMATIONS TECHNIQUES :

<b>Poids :</b>	10.2kg
<b>Largeur :</b>	90cm
<b>Longueur :</b>	91.2 cm
<b>Largeur entre les poignées :</b>	50.5cm
<b>Hauteur du siège :</b>	55 cm
<b>Hauteur de la poignées :</b>	86cm - 95cm du sol
<b>Dimensions du siège :</b>	41 x 28cm
<b>Dimensions des roues :</b>	Arrière : 24cm x 12.3cm ; Avant : 30cm x 18cm
<b>Capacité de poids maximale :</b>	120kg
<b>Dimension replié :</b>	90cm x 14cm x 94cm
<b>Couleurs :</b>	Cadre argent et Roues grises et poignées noires
<b>Composition :</b>	Le cadre du déambulateur Mobi-walk est en aluminium anodisé et les poignées sont en mousse

## ATOUTS :

- Roues idéales pour se déplacer sur le sable même sec
- Sécurité et confort : freins sur les 2 roues, dossier rembourré et rabattable
- Plaisir de s'asseoir pour profiter des joies de la plage
- Pliable : facilement transportable
- Hauteur ajustable : 5 positions

## FABRICATION ET DESCRIPTION


Le cadre du déambulateur Mobi-walk est en aluminium avec vis en acier inoxydable. Les roues avec roulements sont incassables. Les poignées sont ergonomiques et réglables (hauteur entre 70 et 97cm). Il y a un frein pour chaque roue. Le déambulateur est pliable et peut supporter un poids de 125 kg.

## GARANTIE

***A.R. International offre une garantie de deux (2) ans à partir de la date d'achat qui couvre les défauts des matériaux ou de fabrication, uniquement pour le cadre du Mobi-walk. La garantie ne s'applique pas sur les pneus. Toutes les limitations de la garantie seront évaluées par A.R. International. La garantie limitée ne couvre pas les dommages subis par le Mobi-walk en raison de :***

- l'usure normale ;
- d'un entretien inapproprié ;
- d'un mauvais usage, de la maintenance ou du stockage de Mobi-walk ;
- d'un accident ou d'une catastrophe naturelle ;
- des modifications qui ont été faites sur Mobi-walk sans le consentement écrit d'A.R. International ;
- de réparations ayant été faites sans le consentement écrit d'A.R. International.

Cette garantie ne couvre pas les frais de main-d'œuvre ou d'expédition qui peuvent être nécessaires si le châssis de Mobi-walk doit être remplacé ou réparé. Si vous n'êtes pas satisfait des conditions prévues ou des réparations qui ont été faites, merci de contacter directement A.R. International. Les produits ne peuvent être retournés sans le consentement d'A.R. International. La garantie de deux (2) ans est seulement applicable à l'acheteur original.

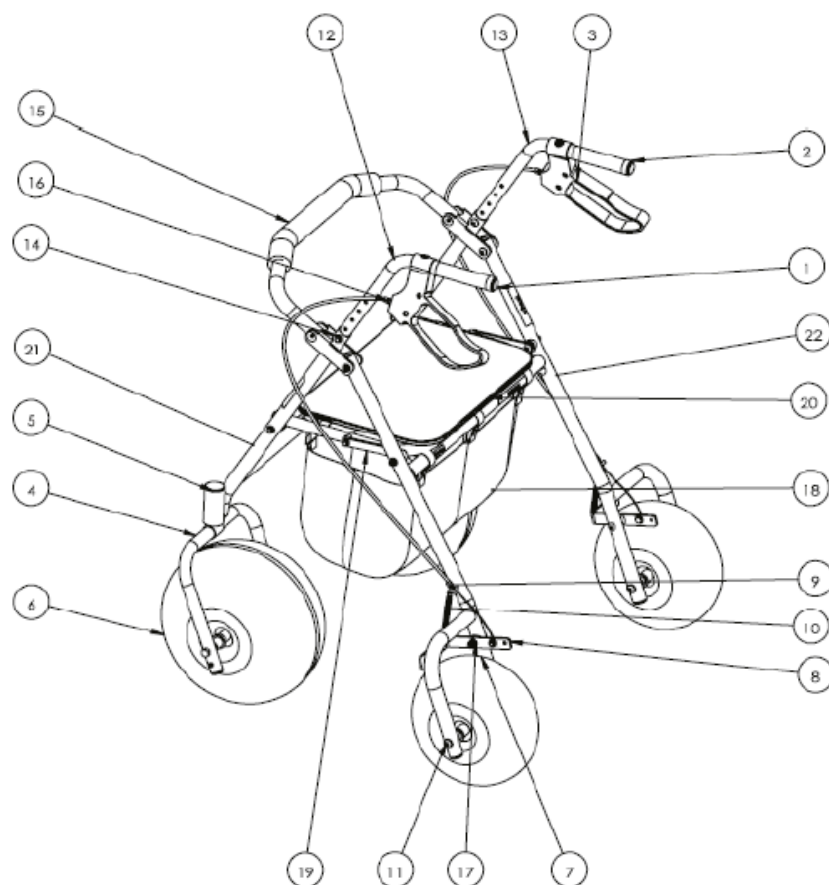

Pièce numéro	Description	Quantité
1	poignée gauche	1
2	poignée droite	1
3	frein à main et câble	2
4	roulette pivotante 30 cm	2
5	cache de la roulette	2
6	WZ1-30 roue en polyuréthane	2
7	WZ1-24 roue en polyuréthane	2
8	bras de frein	2
9	vis de réglage du câble inférieur	2
10	ressort	2
11	kit matériel pour l'assemblage des roues	2
12	guidon gauche	1
13	guidon droit	1
14	vis de réglage de hauteur du guidon	2
15	dossier	1
16	vis de réglage du câble supérieur	2
17	kit matériel d'assemblage du support de frein	2
18	panier en tissu	1
19	plaque de pliage et de verrouillage	2
20	siège	1
21	cadre avant	1
22	cadre arrière	1

# Instructions d'utilisation

## DISPOSITION RELATIVES À LA SÉCURITÉ

1. Ce rollator ne doit pas être utilisé comme un fauteuil roulant, ne pas pousser le rollator lorsque quelqu'un est assis dessus, ou comme un dispositif de transport.
2. Ne pas utiliser le rollator dans des escaliers ou sur un escalator.
3. Consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil. Assurez-vous que votre condition physique est suffisante pour utiliser le rollator.
4. Ouvrez complètement le rollator et posez le siège avant de l'utiliser.
5. Les freins doivent être verrouillés avant de s'asseoir sur le siège. Ne vous asseyez pas sur le siège lorsque le rollator est en pente. Assurez-vous que les freins sont engagés lorsque vous vous levez de la position assise.
6. Ne suspendez pas d'objets lourds aux poignées car cela pourrait affecter la stabilité du rollator.
7. Utilisez le sac de transport fourni pour transporter des objets uniquement (charge maximale sécurisée 5 kg / 11 lbs). N'oubliez jamais qu'un mouvement soudain de la charge peut créer brièvement une surcharge et provoquer une défaillance du produit.
8. Assurez-vous que les 4 roues sont en contact avec le sol à tout moment.
9. N'effectuez aucun réglage sur le rollator pendant qu'il est utilisé.
10. Ce rollator est réglable en hauteur. Assurez-vous que la hauteur de la poignée du rollator est adaptée à votre utilisation. Appliquez une légère pression sur les poignées pour vérifier la stabilité du rollator avant de l'utiliser.
11. Vérifiez les freins après avoir réglé la hauteur du rollator, car les câbles de frein pourraient nécessiter un réglage.
12. Vérifiez les freins avant l'utilisation. Si les freins ne fonctionnent pas, consultez un technicien qualifié et n'utilisez pas le rollator.
13. N'utilisez pas de chaussures trop larges ou des chaussures qui peuvent faire glisser les pieds.
14. Vérifiez le rollator avant chaque utilisation. Si une pièce présente une usure, demandez à un technicien de la remplacer ou de la réparer.
15. Inspectez et entretenez ce rollator. Directives d'instructions d'entretien fournies.