

Cette notice d'utilisation concerne le montage et l'utilisation de l'Aquaccess Mobile.
Lisez attentivement l'ensemble des étapes et respectez l'ensemble des règles de sécurité.

PRÉSENTATION ACCESSOIRES

Pour l'achat de chaque Aquaccess mobile, vous retrouverez les éléments suivants dans votre colis.



Unité de contrôle (avec batterie)
et chargeur de batterie



Prise secteur ~ 230 V



Télécommande de
contrôle



Ceinture de sécurité



Bâche de protection 158 x 158 cm



Roue avant



Roue arrière



Jeu de frein

Tous les accessoires sont disponibles en tant que pièces détachées. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations supplémentaires ou si vous souhaitez acheter l'une de ces pièces.

La bâche de protection de couleur bleu est disponible pour la période "hors-saison" dans votre colis. Elle vous aidera principalement à protéger votre Aquaccess mobile de l'humidité, du froid ou des éléments extérieurs qui pourraient endommager votre produit.

ATOUTS

- **Sécurité** : bouton d'urgence derrière les roues avant, télécommande waterproof, possibilité de le contrôler depuis le bloc d'alimentation (en cas de dysfonctionnement), freins sur les roues arrière pour plus de stabilité.
- **Pratique** : batterie détachable et rechargeable + indicateur de charge sur la batterie et sur le chargeur.
- **Idéal en milieu humide** : roues adaptées, siège hydrofuge, les pièces entrant dans l'eau sont en acier inoxydable.
- **Confortable** : Mécanisme de siège réglable permettant d'ajuster les distances dans l'eau et au-dessus de l'eau en fonction de la demande de l'utilisateur

Aquaccess mobile est aussi bien adapté aux adultes qu'aux enfants !

En cas de besoin ou d'information, nous contacter à l'adresse suivante : sales@deschamps.eu

ASSEMBLAGE



Outils - non fourni :



2 Clés de 13




2 Clés de 17

Temps de montage estimé à 1h30 pour 2 personnes.

Étape 1 : Identifiez l'ensemble des éléments nécessaires à l'assemblage de votre Aquaccess mobile à partir de la liste ci-dessus.


Étape 2 : Positionnez la potence (pièce 1) sur la structure principale et la fixer à l'aide des vis (pièce 13), des rondelles (pièce 11) et des écrous (pièce 10) - voir image ci-contre.

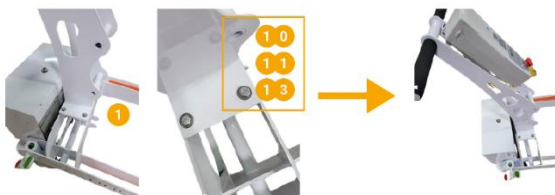

Étape 3 : Insérez les entretoises (pièce 16) de chaque côté de la partie inférieure de la potence (pièce 1).



Étape 4 : A l'aide d'une vis (pièce 14), d'une rondelle (pièce 11) et d'un écrou (pièce 9) venir fixer le bras 2 (pièce 6) à la potence.

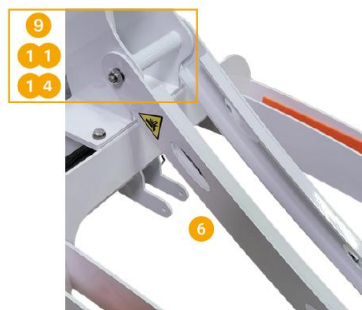

Étape 5 : Répétez les étapes 4 et 5 avec le bras 1 (pièce 5) sur l'étage supérieur.


Étape 6 : Insérez les entretoises (pièce 16) au niveau du châssis du siège (pièce 2) comme indiqué sur la photo ci-dessous.

Étape 7 : Fixez les bras 1 et 2 au châssis du siège (pièce 2) avec une vis (pièce 14), une rondelle (pièce 11) et un écrou (pièce 9).




Étape 8 : Fixez le vérin hydraulique à la structure principale à l'aide de la vis (pièce 15) et d'un écrou (pièce 10).

Étape 9 : Fixez la partie supérieure du vérin au bras 1 (pièce 5) à l'aide d'une vis (pièce 14), d'une rondelle (pièce 11) et d'un écrou (pièce 9).

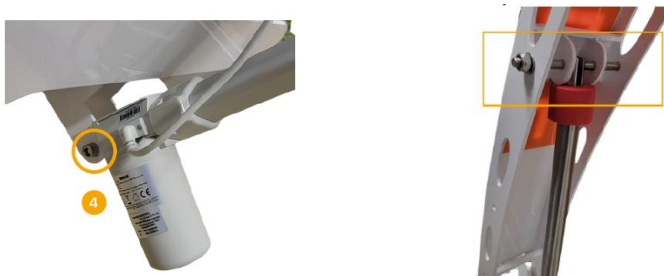


Étape 10 : Insérez les accoudoirs (pièce 8) dans les fourreaux et serrez-les avec une rondelle et la vis prévue à cet effet.

Étape 11 : Positionnez le siège (pièce 7) en face des trous présent sur les ailes du repose-pieds (pièce 3).

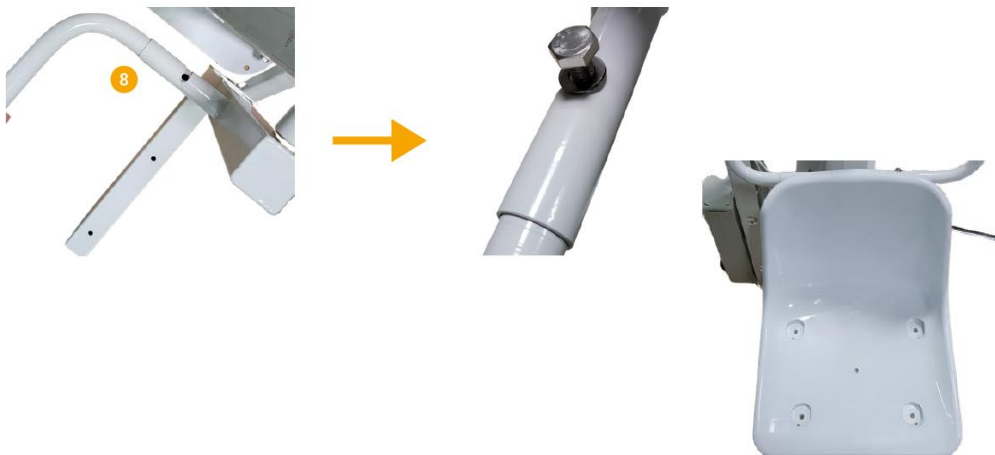

Étape 12 : Insérez une rondelle (pièce 11) et une vis (pièce 13). Fixez l'ensemble avec un écrou (pièce 10) et serrez à l'aide de 2 clés de 17.

Étape 13 : Mettre les protections du siège (pièce 12).

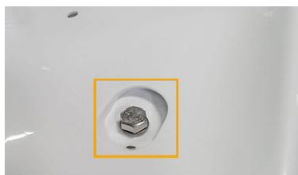

Étape 14 : Fixez le boîtier d'alimentation à la structure comme indiqué sur l'image.

Étape 15 : Branchez les câbles fournis. (Veillez à ce que les câbles soient complètement insérés. Une absence de contact peut provoquer une panne ou un dysfonctionnement).



MONTAGE FINAL



OÙ INSTALLER VOTRE AQUACCESS MOBILE ?

- Installations thermales
- Piscines d'hydrothérapie pour personnes à mobilité réduite
- Fédérations sportives
- Hôtels de tourisme de santé pour personnes handicapées et âgées
- Piscines publiques
- Piscines privées
- Centres de soins pour personnes âgées
- Centres de villégiature
- Piscines extérieures dans les hôtels
- Centres de réadaptation hôtelière clinique

CONDITIONS D'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE D'INSTALLATION :

- Aquaccess Mobile peut être utilisé dans des piscines extérieures ou intérieures.
- Un espace libre sans obstacles est requis autour de l'Aquaccess mobile.
- La distance entre les roues et la piscine doit être de 3 à 5cm.
- L'assise du siège doit pénétrer dans l'eau d'au moins 45,5 cm.
- Veuillez faire attention à la distance du repose-pieds dans les piscines dont la profondeur ne dépasse pas 140 cm.

LES RÈGLES À RESPECTER :

- Pour utiliser l'élévateur en toute sécurité, vous devez suivre les instructions d'installation et d'utilisation.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec et autour de l'élévateur.
- Ne vous asseyez pas sur l'élévateur de piscine lorsqu'il n'y a pas d'eau dans la piscine.
- Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser dans une situation où personne ne peut vous aider en cas d'urgence.
- Ne pas utiliser sans ceinture de sécurité.
- Ne pas utiliser sans avoir activé les freins
- Appuyez sur le bouton d'arrêt en cas d'urgence.

UTILISATION DE L'AQUACCESS MOBILE POUR ENTRER ET SORTIR DE LA PISCINE :

- **Étape 1 :** S'asseoir sur le siège et attacher la ceinture de sécurité
- **Étape 2 :** Placez vos pieds sur le repose-pieds
- **Étape 3 :** Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles ou de risques le long de la zone de l'élévateur
- **Étape 4 :** Tenez la télécommande et maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que votre taille soit immergée dans l'eau de la piscine ou à l'inverse jusqu'à ce que vous soyez remonté au bord de la piscine. Cette action peut être réalisée par un accompagnateur ou par vous-même
- **Étape 5:** Retirez votre ceinture après l'arrêt de l'élévateur.

Il est fortement déconseillé de brancher la batterie directement sur une prise secteur (230V) car cela pourrait l'endommager. Privilégiez le chargement avec le boîtier fourni.

En période hivernale, nous vous conseillons de stocker les batteries à l'abri de températures trop basses afin d'éviter de les endommager.

ENTRETIEN

- Nettoyer l'élévateur avec de l'eau propre uniquement, ne pas utiliser d'eau de piscine.
- Essuyez avec un chiffon propre, doux et non abrasif.
- Ne pas exposer l'élévateur à des composants électroniques ou à une pression d'eau directe pendant le nettoyage de l'élévateur.
- Ne pas stocker l'élévateur dans un endroit où il peut subir des chocs et entrer en contact avec des produits chimiques.

PROGRAMME ENTRETIEN PÉRIODIQUE DE L'AQUACCESS MOBILE :

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN	JOURNALIER	HEBDOMADAIRE	MENSUEL
Rincer à l'eau claire et nettoyer (Ne pas appliquer d'eau sous pression directement sur les composants électroniques de l'élévateur)	✓		
Chargez la batterie		✓	
Pour s'assurer qu'il fonctionne sans problème, faites fonctionner l'élévateur 1 fois pour qu'il effectue son mouvement complet sans personne dessus (avant chaque utilisation)	✓		
Vérifiez que l'élévateur n'est pas endommagé, corrodé et que le matériel n'est pas desserré ou manquant.	✓		
Contrôlez tous les points de connexion et vérifiez qu'ils ne sont pas endommagés ou corrodés.		✓	
Vérifiez les étiquettes d'avertissement et remplacez-les si elles sont usées			✓
Vérifier le serrage des vis de l'accoudoir et du repose-pieds		✓	

RÉSOLUTION PROBLÈMES TECHNIQUES

Si l'élévateur de piscine ne fonctionne plus :

- **Résolution 1 : Le câble de l'unité de commande peut être débranché.** Dans ce cas, assurez-vous que le câble de l'appareil est connecté à l'unité de commande.
- **Résolution 2 : Les éléments de connexion entre l'unité de commande et l'actionneur peuvent être délogés.** Dans ce cas, assurez-vous que les connexions entre l'unité de commande et l'actionneur sont entièrement connectées.
- **Résolution 3 : La batterie (pile) peut être déchargée.** La batterie peut être épuisée ou hors d'usage en fonction de son utilisation. Dans ce cas, essayez de charger et de remettre en service la batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée avec le chargeur.

Si après cela votre problème n'est pas résolu, n'entreprenez aucune autre action, veuillez appeler notre société pour obtenir les conseils nécessaires de l'équipe technique. (Tél : +33 3 83 71 67 11)

NORMES

- Commande manuelle étanche (norme IP 66)
- Certificat CE
- Certificats ISO 9001 et ISO 13485

GARANTIE

DESCHAMPS offre une garantie de deux (2) ans à partir de la date d'achat qui couvre les défauts des matériaux ou de fabrication. Toutes les limitations de la garantie seront évaluées par l'entreprise DESCHAMPS.

La garantie limitée ne couvre pas les dommages subis par Aquaccess Mobile en raison de :

- l'usure normale ou d'un entretien inapproprié ;
- d'un mauvais usage, de la maintenance ou du stockage de Aquaccess Mobile ;
- d'un accident ou d'une catastrophe naturelle ;
- des modifications qui ont été faites sur Aquaccess Mobile sans le consentement écrit de DESCHAMPS;
- de réparations ayant été faites sans le consentement écrit de DESCHAMPS .

Cette garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre ou d'expédition qui peuvent être nécessaires si le châssis de Aquaccess Mobile doit être remplacé ou réparé. Si vous n'êtes pas satisfait des conditions prévues ou des réparations qui ont été faites, merci de contacter directement l'entreprise DESCHAMPS. Les produits ne peuvent être retournés sans le consentement de la société DESCHAMPS. La garantie de deux (2) ans est seulement applicable à l'acheteur original.

RÉFÉRENCES



ETS A.DESCHAMPS ET FILS
Usine de Bourisson
16400 La Couronne – FRANCE
+33 (0) 545 677 030

Property of ETS A.DESCHAMPS ET FILS and
DESCHAMPS MATS SYSTEMS INC. Mobi-mat®. All
rights reserved. Non-contractual pictures.
Products and specifications can be changed
without prior notice.

DESCHAMPS MATS SYSTEMS
218 Little Falls Road, Unit 12
Cedar Grove NJ 07009 – USA
+1 973 928 3040
GSA contract#47QSWA23D004U