


Cette notice d'utilisation concerne le montage et l'utilisation d'Accessound.
Lisez attentivement l'ensemble des étapes et respectez l'ensemble des règles de sécurité.

CONDITIONS D'UTILISATION

Présentation du casque et chargement

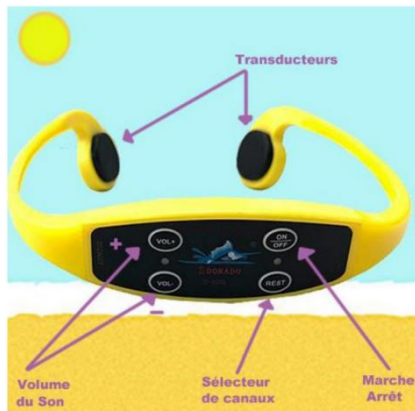

Lorsque vous recevez votre Accessound, veuillez-vous assurer de brancher les 2 unités (casque et émetteur) et de charger complètement chaque unité avant leur utilisation :

- Le casque utilise le DC + 5V
- L'émetteur utilise le DC + 5V

Dans un premier temps il est nécessaire de s'assurer que les casques soient complètement chargés avant chaque utilisation : le temps de charge est de 1 à 2 heures pour une autonomie allant jusqu'à 6 heures.

- Voyant rouge = en cours de chargement.
- Voyant éteint = complètement chargé et prêt à être utilisé.

ATTENTION : En cas de non utilisation du produit pendant une période importante, le casque doit être chargée au moins 1 fois par mois afin d'éviter tous risques d'endommagements de la batterie et dégradation de sa durée de vie.

Mise en marche du système

- Allumer le casque en maintenant le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes.
- Allumer l'émetteur (talkie-walkie) en tournant le bouton volume dans le sens horaire.

Quand l'émetteur est allumé 2 lumières doivent apparaître :

- Lumière bleu signifie que l'unité est allumée.
- Lumière rouge, bleu ou jaune indique le canal sur lequel l'émetteur est activé.
- Utiliser le bouton de fonction (REST) du casque pour sélectionner le canal souhaité.

Les témoins lumineux du casque et de l'émetteur doivent être de la même couleur afin de garantir une bonne connexion entre les 2 appareils. Lorsque 2 casques sont sur un même un canal aucun son parasite ne doit être entendu.

- Augmenter ou baisser le volume en fonction de vos préférences et de votre confort.

Le casque s'installe dans le sens inverse d'un casque audio habituel, il est important de positionner les transducteurs au niveau des pommettes et non des oreilles !

Conseils d'utilisation et Sécurité

Pour une bonne utilisation de l'Accessound, nous vous recommandons d'utiliser les bonnets disponibles dans votre commande afin d'éviter tous risques de perte en cas de vagues. Nous vous conseillons de toujours faire un test son avec l'utilisateur avant de rentrer dans l'eau afin de s'assurer que ce dernier soit bien à l'aise avec le produit.

La baignade ne se fait pas n'importe où, il est essentiel de respecter les zones de baignade surveillées et sécurisées par les sauveteurs professionnels (M.N.S). N'hésitez pas à proposer un gilet de flottaison pour plus de sécurité.

Signes importants à assimiler pour échanger avec une personne possédant une déficience visuelle :



GARANTIE

DESCHAMPS offre une garantie de deux (2) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication du produit. Les altérations dues à un usage normal ne sont pas considérées comme des défauts de fabrication. Les dommages causés par du vandalisme ne sont pas couverts par la garantie. La garantie ne s'applique pas sur :

- l'usure normale des solutions ou un mauvais usage, maintenance ou stockage de la solution.
- un accident ou une catastrophe naturelle
- des modifications qui ont été faites sur la solution sans le consentement écrit de DESCAMPS.
- de réparations ayant été faites sans le consentement écrit de DESCAMPS.
- les frais de main d'œuvre ou d'expédition qui peuvent être nécessaires si des réparations sont envisagées.

Si vous n'êtes pas satisfait des conditions prévues ou des réparations qui ont été faites, merci de contacter directement l'entreprise DESCAMPS. Les produits ne peuvent être retournés sans le consentement de la société DESCAMPS. La garantie de deux (2) ans est seulement applicable à l'acheteur original.

RÉFÉRENCES

Ce produit est référencé par l'association Handiplage pour l'aide à la baignade des non-voyants.

